

УСТАНОВИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ



Подключите свой браслет. Начинайте жить лучше.

Посетите **up.jawbone.com**



УСТАНОВИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Зайдите на **up.jawbone.com**

ПОДКЛЮЧИТЕ СВОЙ БРАСЛЕТ

Следуйте инструкциям для соединения вашего браслета и создайте свой профиль.



ПОЗДРАВЛЯЕМ

Начинайте жить лучше.


Нужно зарядить ваш браслет?

Просто подключите его к компьютеру при помощи входящего в комплект USB-кабеля.

Если  индикатор горит, не мигая, значит, браслет полностью заряжен.



ПОЗНАКОМЬТЕСЬ СО СВОИМ БРАСЛЕТОМ **UP**

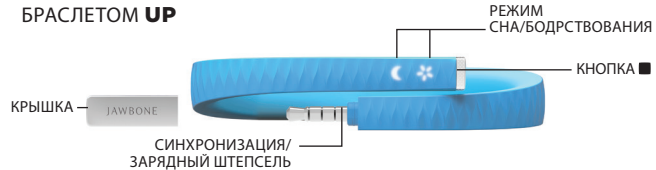

КНОПКА

Проверка режима _____ нажмите ■

Изменение режима _____ нажмите ■ и удерживайте, пока браслет не завибрирует

Секундомер _____ нажмите ■, нажмите еще раз и удерживайте, пока браслет не завибрирует

Восстановительный сон _____ нажмите ■ дважды, затем нажмите и удерживайте, пока браслет не завибрирует

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Вам нужно знать некоторую информацию о вашем браслете UP как в целях вашей собственной безопасности, так и во избежание повреждения браслета.

- Не надевайте и не чистите браслет UP во время его подзарядки. Прежде чем чистить браслет UP, убедитесь в том, что он отключен от устройства, используемого для его подзарядки.
- Избегайте попадания жидкости, влаги, влажного воздуха и дождя на ваш браслет UP и любое устройство, используемое для его подзарядки, во время процесса подзарядки. Попадание влаги на браслет UP во время подзарядки может привести к электрическому шоку.
- Браслет UP не следует чрезмерно сгибать и крутить. Это может привести к повреждению электрических компонентов, а также к шоку.

УХОД ЗА UP

- Ваш браслет не боится дождя, брызг и пота, но его нельзя погружать в жидкости. Снимайте браслет перед плаванием, принятием ванны и глубоководными погружениями.
- Для очистки браслета UP используйте только сухую ткань или бумагу. Не используйте влажные чистящие средства для очистки браслета UP.
- Не подвергайте свой браслет UP крайне высоким или низким температурам.
- Не позволяйте браслету UP контактировать с острыми предметами. Это может привести к появлению царапин и повреждению браслета.
- Не пытайтесь починить, изменить или разобрать браслет UP; в нем не содержится каких-либо компонентов, которые пользователь мог бы починить самостоятельно. Подобные манипуляции ведут к аннулированию гарантии.

- Для подзарядки браслета UP используйте только поставляемый с ним USB-кабель, который необходимо подключать только к USB-совместимым портам.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: UP ОТ JAWBONE НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКИМ УСТРОЙСТВОМ.

Браслет UP и относящиеся к нему приложения не должны использоваться для диагностирования, лечения или профилактики любого заболевания или состояния здоровья. Всегда консультируйтесь у квалифицированного врача, прежде чем вносить какие-либо изменения в физические упражнения, сон или питание, поскольку это может вызвать серьезные нарушения здоровья или привести к смерти.

УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Браслет UP, аккумулятор и данная упаковка должны утилизироваться в соответствии с местными правилами. Не выбрасывайте аккумулятор вместе с обычным домашним мусором.

НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для получения нормативной информации войдите в приложение для вашей страны. Войдите в приложение UP, Настройки > Помощь > Нормативная информация

ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, Посетите jawbone.com/support



ЗНАЙТЕ СЕБЯ
ЖИВИТЕ ЛУЧШЕ

Вопросы? Поддержка?
jawbone.com/support/UP



حمل التطبيق

وصل سوارك. انعم بحياة أفضل.
انخل على **up.jawbone.com**