

Весы напольные механические MS01 120 кг/1кг

Инструкция по применению

УСТАНОВКА

Поместите весы на ровную и твердую горизонтальную поверхность. Использование весов на неровной или мягкой поверхности (например, на ковре с высоким ворсом) может привести к ошибкам в измерениях.

ВЗВЕШИВАНИЕ

1. Поворачивайте колесико на торцевой стороне весов до тех пор, пока стрелка измерительной шкалы не укажет на «0».
2. Несколько раз взойдите и сойдите с весов для того, чтобы убедиться, что стрелка каждый раз возвращается на «0». Если этого не происходит, то вернитесь к шагу 1.
3. Теперь встаньте на весы, равномерно распределив свой вес на платформе. Постарайтесь не двигаться, пока стрелка не остановится.
Прочтите свой вес.
4. Внимание! Вес человека меняется в течение дня. Для получения более объективной картины динамики веса взвешивайтесь в одно и то же время суток.

УХОД

1. Для очистки весов используйте влажную салфетку. Не применяйте какие-либо чистящие средства.
2. При перемещении весов возможно отклонение стрелки от нулевого показания. В этом случае отрегулируйте заново стрелку шкалы.
3. **Нельзя** бросать весы, прыгать на платформе, превышать максимально допустимую для весов нагрузку, хранить весы с нагруженной платформой ! Это может испортить механизм весов.

Гарантия

Мы предоставляем гарантию на дефекты материала и изготовления на срок 36 месяцев со дня продажи через розничную сеть .

Гарантия не распространяется :

- на случаи ущерба ,вызванного неправильным использованием
- на быстроизнашивающиеся части (напр. батарейки)
- на дефекты , о которых покупатель знал в момент покупки
- на случаи собственной вины покупателя

Товар не подлежит обязательной сертификации

Срок эксплуатации изделия: минимум 3 года

Фирма изготовитель : Бойрер ГмбХ, Софлингер штрассе 218,
89077-УЛМ , Германия

Сервисный центр : 109451 г.Москва ,ул.Перерва 62, корп.2
Тел(факс) 495 658 54 90



Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп магазина _____