




Руководство по быстрой установке Withings Pulse O2


1

Чтобы включить дисплей, нажмите кнопку «пуск»

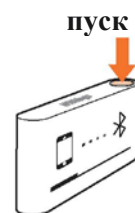


Экран не светится?

Зарядите аккумуляторные батареи устройства.

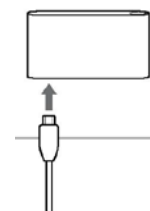

2

Установка с использованием смартфона или планшета

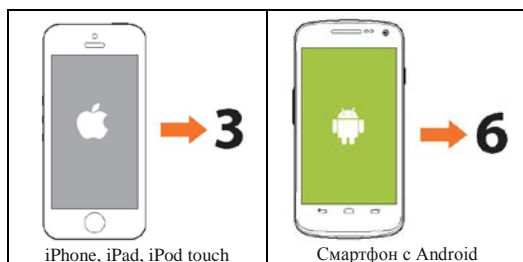

iPhone, iPad, iPod touch


Смартфон с Android

3

Войдите в меню Settings / Bluetooth / ON - »Withings Pulse O2



Меню Settings (Настройки)

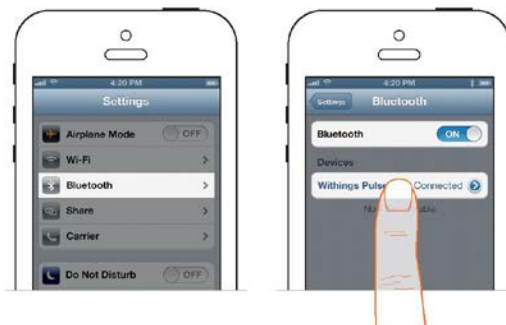

4

Установите приложение Withings из интернет-магазина Apple AppStore



Приложение уже установлено?
Обновите его!

5


Запустите приложение и следуйте инструкциям



После выполнения всех инструкций приложения -> 9

6


Войдите в меню Settings / Bluetooth / ON -
»Withings Pulse O2

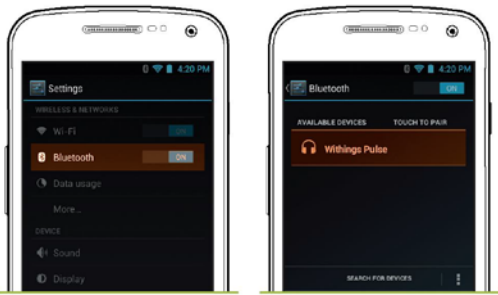

Меню Settings (Настройки)

7

Установите приложение Withings из интернет-магазина Google play

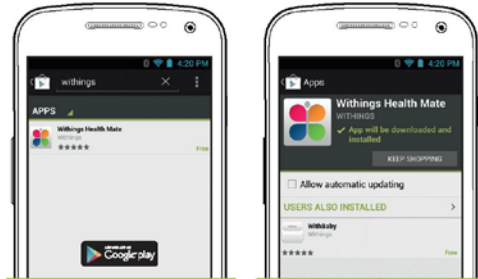

Приложение уже установлено?
Обновите его!

8


Запустите приложение и следуйте инструкциям



После выполнения всех инструкций приложения -> 9


9

Нажмите, чтобы изменить режим работы дисплея

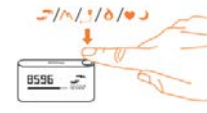- Steps (Шагомер)
 - Elevation (Высота)
 - Distance (Расстояние)
 - Calories (Калории)
 - heart Rate, Sleep (Частота сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, сон)
- 


10

Измерьте частоту сокращений своего сердца и уровень кислорода в крови

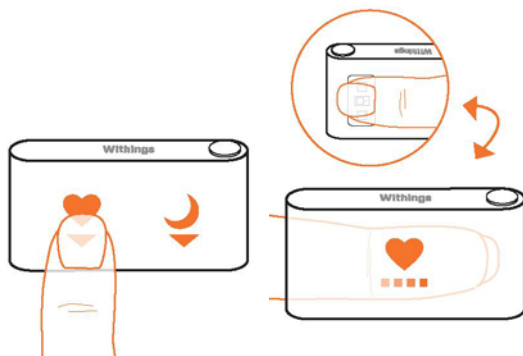


Приложите палец (не надавливая) к светящемуся датчику на задней стороне дисплея

11 Как синхронизировать приложение Withings pulse O2?

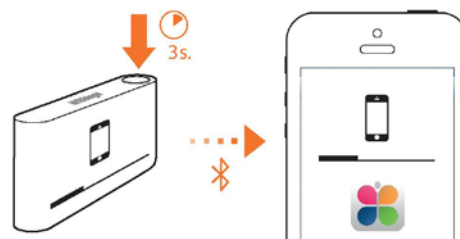

Подключите дисплей к компьютеру, чтобы зарядить его аккумуляторные батареи (а не синхронизировать данные).

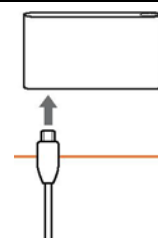

ЧТО В КОРОБКЕ?



Дисплей Withings pulse O2



Кабель питания




Клипса для ремня




Пластиковый браслет для ношения на руке

Как носить дисплей Withings pulse O2?

Днем

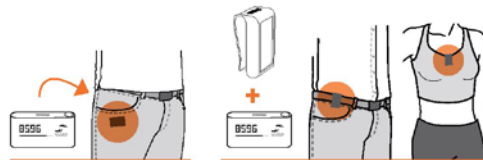

Ночью

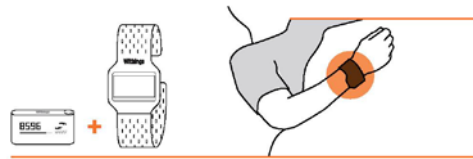

FCC ID: XNAWAM01

Данное устройство соответствует части 15 Правил FCC (Федеральной комиссии по связи США).

При эксплуатации необходимо выполнить два условия:

- (1) Данное устройство не должно создавать вредных помех и
- (2) Данное устройство должно допускать прием любых помех, в том числе помех, которые могут привести к его неправильной работе.

Компания Withings

Withings Pulse QIG | v 1.1 | 16 мая 2013 года

©2013 Withings. Все права защищены.

iPad, iPhone и iPod touch являются торговыми марками компании Apple inc.

Android является торговой маркой компании Google Inc.