



Withings Aura. Краткое руководство.

Описание прикроватной установки

Внешняя сторона

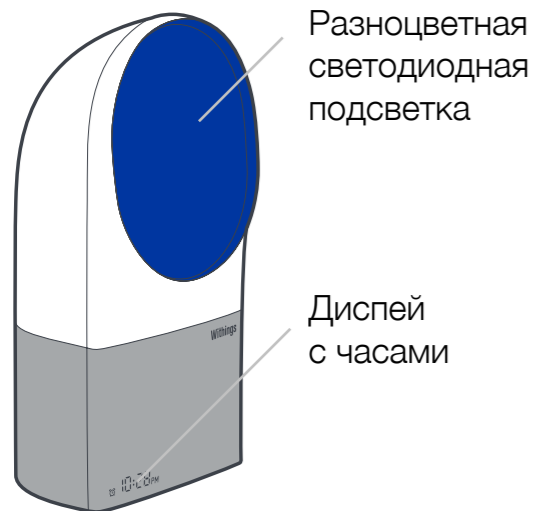

Задняя сторона

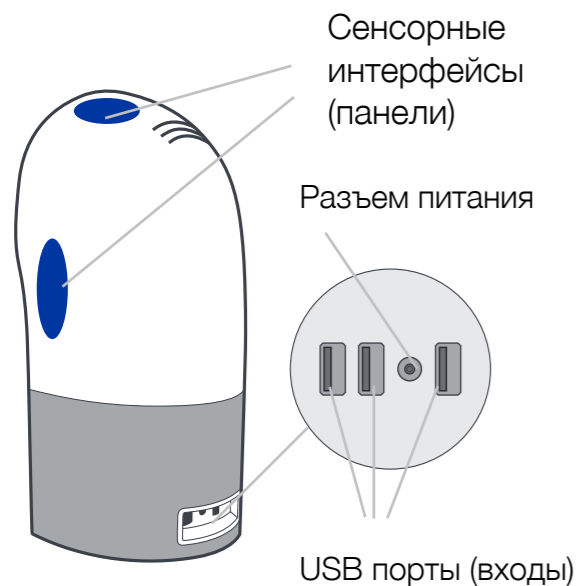

Установка устройства

1. Расположите сенсор (анализатор) сна под матрасом вашей кровати
2. Подсоедините сенсор (анализатор) сна к одному из USB портов вашей прикроватной установки
3. Расположите прикроватную установку (на прикроватную тумбочку» лицом к вам
4. Подсоедините зарядное устройство к розетке, а затем к прикроватной установке
5. Процесс калибровки занимает 10 минут/ Процесс активации занимает 1 минуту
6. Посетите раздел go.withings.com через интернет браузер вашего смартфона
7. Запустите Приложение Health Mate

Функции прикроватной установки



Коснитесь рукой верхней панели устройства для включения и выключения света



Проведите рукой по боковой панели для настройки интенсивности света



Прикоснитесь рукой к боковой панели и удерживайте руку в течение 3 секунд для настройки будильника



Приложите руку к верхней панели для запуска программы анализа сна



Коснитесь рукой верхней панели для отмены (чтобы отложить) функцию пробуждения



Коснитесь верхней панели дважды для отмены любой из программ


ВАЖНО!

В случае падения Прикроватного устройства, не смотрите прямо на источник светодиодного освещения, отключите электропитание и обратитесь к разделу « Инструкция по технике безопасности » в полном руководстве пользователя на сайте withings.zendesk.com или на сайте www.di-house.ru.

Не укрывайте прикроватное устройства никакими материалами!


Комплектация

1 Сенсор сна

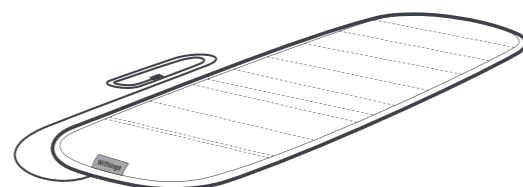

2

Прикроватная установка

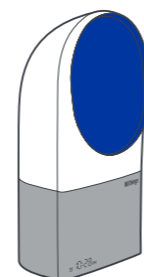

3

Зарядное устройство и переходники под разные типы розеток

