



ЛОЖКА GYENNO


Характеристики продукта

Краткое описание устройства

ЛОЖКА GYENNO


Умный столовый прибор - простой и надежный инструмент, помогающий пациентам с тремором рук самостоятельно принимать пищу. Оснащен функцией интеллектуального обнаружения и стабилизации тремора рук.

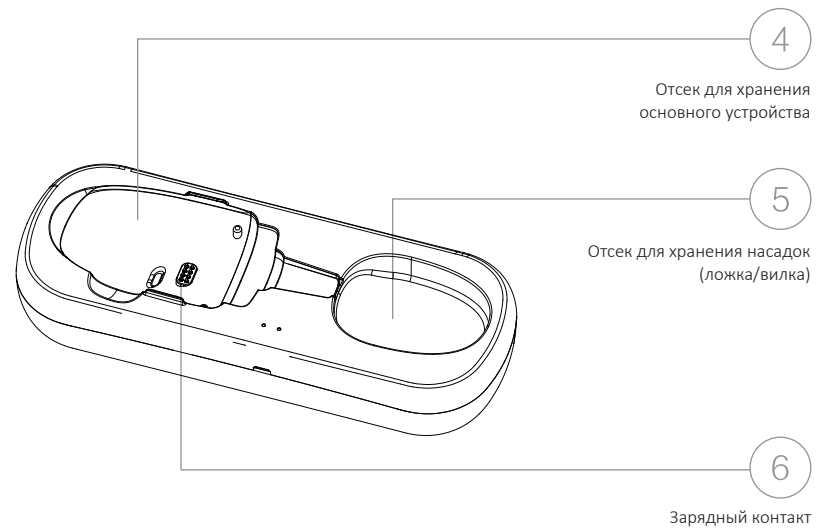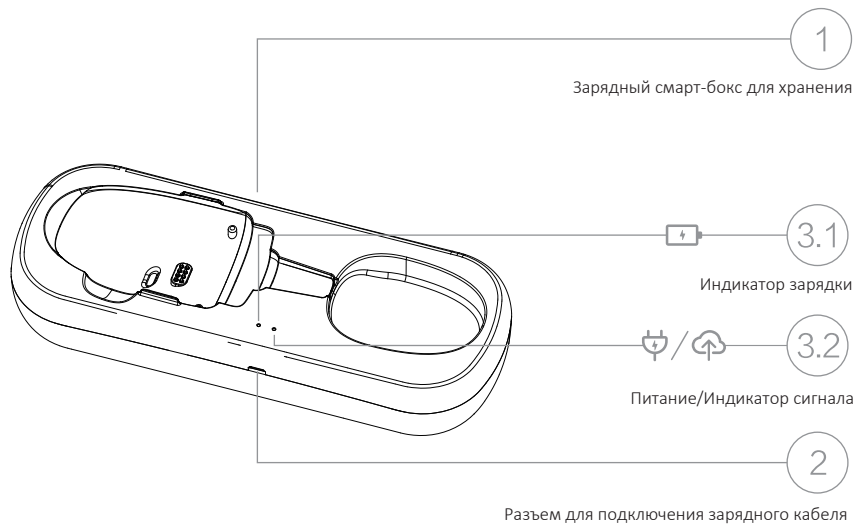

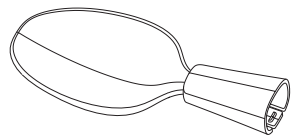


7

Насадка-ложка

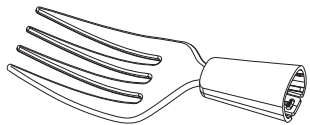

8

Насадка-вилка (Опционально)

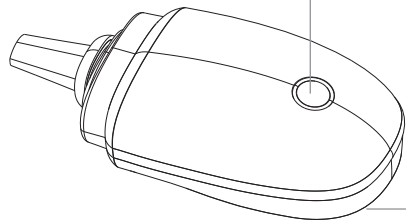


9

Основной индикатор работы


10

Рукоятка GYENNO Spoon Lite

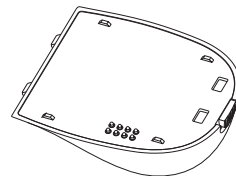


11

Смарт-батарея

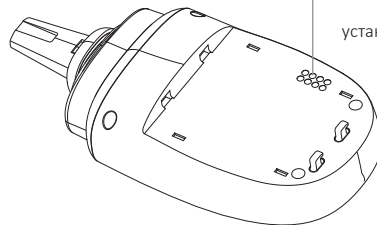

12

Контакт для установки батареи

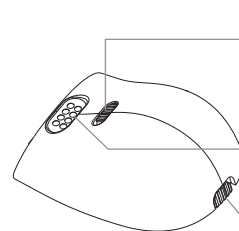

13

Переключатель Вкл/Выкл

14

Зарядный контакт

15

Переключатель для установки и извлечения батареи



16

Зарядный USB кабель

Характеристики индикатора

Основной индикатор работы GYENNO Spoon Lite

Цвет индикатора	Состояние
Красный	Низкий заряд аккумулятора
Зеленый	Режим ожидания
Синий	Режим стабилизации дрожания

Индикатор на зарядном смарт-боксе

	Цвет	Состояние
Индикатор зарядки 31	Красный	Зарядка
	Синий	Полностью заряжено
Индикатор питания / сигнала 32	Желтый	Включено
	Зеленый	Н/П

Способ использования

1. Извлеките устройство GYENNO Spoon Lite из зарядного бокса и переведите переключатель в положение Включено. Во время приема пищи держите устройство GYENNO Spoon Lite в наиболее удобном для вас положении.
2. Если основной индикатор работы горит зеленым светом, устройство находится в режиме ожидания. Если индикатор синий, устройство в режиме стабилизации дрожания. Если индикатор красный, заряд батареи на исходе - зарядите батарею.
3. Перед очисткой отсоедините насадку (ложка/вилка) от рукоятки:
 - а) Отключите устройство перед отсоединением насадки. Не погружайте рукоятку в воду и не держите ее под проточной водой.
 - б) Рукоятку можно чистить антибактериальными салфетками или влажной губкой с мягким моющим средством.



Зарядка

Зарядка длится приблизительно 4,5 часа

Зарядите устройство перед первым использованием, чтобы избежать разрядки аккумулятора. Для полной зарядки смарт-аккумулятора требуется около 4,5 часов.

Вставьте рукоятку GYENNO Spoon Lite в отсек хранения основного устройства. Убедитесь, что зарядный контакт рукоятки плотно прилегает к контакту зарядного бокса.

1. Возьмите зарядный USB кабель и вставьте один его конец в разъем для подключения зарядного кабеля.
2. Другой конец зарядного USB кабеля вставляется в USBпорт (5.0 В, 2.0 А пост. тока).

*Если индикатор зарядки не загорается, это означает, что зарядные контакты не прилегают друг к другу надлежащим образом. Извлеките рукоятку из зарядного бокса и заново ее туда положите. Если загорается красный индикатор  идет процесс зарядки устройства. Если загорается синий индикатор  устройство полностью заряжено.

*Независимо от того, включена ли ложка GYENNO Spoon Lite или выключена, ее можно положить в зарядный бокс на зарядку. Однако мы рекомендуем выключить устройство перед зарядкой.

Рекомендации по использованию GYENNO Spoon Lite

1. Не напрягайтесь во время использования ложки GYENNO Spoon Lite, так как ваше напряжение и беспокойство могут усилить тремор. В течение нескольких дней вы полностью адаптируетесь к новому способу приема пищи с помощью ложки GYENNO. В первый раз мы рекомендуем использовать ложку в уединенном месте, без присутствия других людей.
2. Чтобы найти наилучший способ использования ложки GYENNO Spoon Lite, в начальный период адаптации вы можете пробовать держать ложку в различных положениях, регулировать угол и направление приема пищи.
3. Поскольку вам необходимо освоить новый способ приема пищи, мы рекомендуем вырабатывать наиболее удобные для вас движения в течение не менее одной недели, чтобы вы смогли полностью адаптироваться к приему пищи с помощью ложки GYENNO Spoon Lite.
4. Во время приема пищи рекомендуется пользоваться большой неглубокой миской, чтобы обеспечить достаточное пространство для использования GYENNO Spoon Lite.
5. Не прилагайте какую-либо силу и не напрягайте руку, в которой держите устройство во время приема пищи. Для обеспечения эффективной работы устройства необходимо максимально расслабиться, чтобы не сковывать характерные движения руки при треморе.

Меры предосторожности

1. Насадки (ложка / вилка) GYENNO Spoon Lite можно мыть только отдельно, после их отсоединения от рукоятки устройства. Остальные части GYENNO Spoon Lite негерметичны, поэтому не погружайте их в воду и не держите под проточной водой.
2. GYENNO Spoon Lite можно использовать только для помощи при приеме пищи. Не используйте устройство в иных целях, не превышайте максимально допустимую нагрузку, не прикладывайте чрезмерную силу - это может сократить срок службы, а также стать причиной повреждения устройства.
3. Устройство GYENNO Spoon Lite включает в себя моторы и высокоточные компоненты, поэтому держите его вдали от магнитных полей. В случае длительного воздействия магнитных полей производительность и срок службы устройства могут существенно сократиться.
4. Выключите устройство после приема пищи. Извлеките аккумулятор из устройства, если вы не используете устройство в течение длительного времени.
5. Независимо от того, включено устройство GYENNO Spoon Lite или нет, не прикладывайте чрезмерную внешнюю силу для его управления - это может сократить срок службы, а также стать причиной повреждения устройства.
6. Не допускайте попадания воды или другой жидкости в зарядный бокс.
7. Не держите рукоятку под проточной водой.
8. Если зарядный бокс упал в воду, немедленно отключите питание.
9. Не допускайте воздействия источников тепла или открытого огня, а также воздействия неблагоприятных условий окружающей среды.
10. Любого рода ущерб, вызванный небрежным обращением, неправильным использованием или аварийной ситуацией не покрывается гарантией.
11. Отключите устройство перед отсоединением насадок.